

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY LASEROWE ZAMYKANIE TORBIELI PILONIDALNEJ (LCP)



PRZED ZABIEGIEM

Lek przeciwzakrzepowy

Na ogół zaleca się przerwać przyjmowanie.

PODCZAS ZABIEGU

Antybiotyki

Nie są konieczne.

Znieczulenie

- Znieczulenie ogólne.
- Bupiwakaina 0,5% z adrenaliną 1:10.000.

Długość fali/laser

1470 nm (810 lub 980 nm penetrują głębiej tkankę, nie są tak skuteczne) 600 µm włókno ze specjalną szklaną końcówką, rozprowadzanie światła laserowego 360°.

Moc

10 W

Podawanie energii

Co 5 mm przez 3 sekundy, zaczynając od jednego końca kanału torbieli, delikatnie przesuwając włókno do momentu, kiedy pocujemy przywieranie tkanki. Wówczas należy z końcówki włókna delikatnie usunąć kawałki tkanki. Następnie wsunąć ponownie światłowód do kanału torbieli, aż do wyczucia oporu.

W przypadku poszerzeń/wgłębień kanału torbieli nie wyczuwa się żadnego oporu. Dlatego należy obracać końcówkę włókna w taki sposób, by podana energia miała kształt wachlarza i mogła osiągnąć do wszystkich krawędzi zagłębień.

Opatrunek

Opatrunek uciskowy.

PO ZABIEGU

Odczucia pozabiegowe

Niewielkie dolegliwości bólowe i niewielkie krwawienia do 4 tygodni.

Opatrunek

Nieprzywierający bandaż po pierwszej zmianie opatrunku, przemywać wodą 3 razy dziennie, stosować maść z jodopowidonem na kompresie gazowym.

Środki przeciwbólowe

Ibuprofen 600 doraźnie.

Zwolnienie lekarskie

3 dni, ale osoba prowadząca własną działalność może wrócić do pracy już następnego dnia.

Aktywność sportowa

- Bez podnoszenia ciężarów przez 3 tygodnie.
- Bez sportów kontaktowych przez 3 tygodnie.
- Bez joggingu przez 1 tydzień.
- Jeżdżenia na rowerze przez 1 tydzień.
- Bez pływania w basenie do czasu zasklepienia rany.

Usuwanie włosów

Nie ma mocnych dowodów na zalety usuwania włosów po kompletnym wygojeniu. Niemniej jednak jest to wskazane do czasu zamknięcia rany.

Ryzyko

- W miejscu rany wystąpi większa lub mniejsza nieckowata blizna.
- Jeżeli długość kanału torbieli przekracza 5 cm, zrobić dodatkowe ujście pomiędzy ujściem początkowym a końcowym.
- Użyć USG, aby nie przeoczyć „odnóg” kanału.

DYSTRYBUTOR: Consultronix SA

laseroterapia@cxsa.pl | serwis@cxsa.pl
12 290 22 22 | neo-laser.pl

KONTAKT